

EasySAFE[®] PLUS

Contenitori di sicurezza



INNOVAZIONE d'eccellenza
TECNOLOGIA d'avanguardia
DESIGN intelligente

I contenitori di sicurezza EasySAFE[®] PLUS sono dispositivi progettati e costruiti per applicazioni di "alto flusso ed alto vuoto" da utilizzare in abbinamento ai regolatori di vuoto EasyVAC[®] PLUS e agli aspiratori Venturi EasyAIR[®].

STRUTTURA

I contenitori di sicurezza della serie **EasySAFE[®] PLUS** sono utilizzati a protezione dei dispositivi e dell'impianto a monte, qualora la valvola di troppo pieno del contenitore di raccolta primario non funzioni regolarmente. Sono sterilizzabili in autoclave (134 °C - 18 min.) e sono corredati di valvola di troppo pieno a galleggiante; dispongono inoltre di alloggiamento per filtro antibatterico per garantire una completa protezione del sistema d'aspirazione contro qualsiasi contaminazione. La connessione di alimentazione con aggancio mediante ghiera a scatto, che facilita il montaggio e la rimozione dai regolatori di vuoto **EasyVAC[®] PLUS** e dagli aspiratori Venturi **EasyAIR[®]**, il portagomma utilizzato per l'aspirazione, con possibilità di orientamento a 360°, e il bicchiere con serraggio rapido a 1/12 di giro al coperchio, garantiscono un'estrema facilità di utilizzo da parte degli operatori addetti.

CAPACITÀ

Il bicchiere ha volutamente una ridotta capacità (ca. 50 ml) affinché anche una piccola presenza di fluido possa attivare immediatamente la valvola flottante per arrestare l'aspirazione.

Informazioni principali



I contenitori di sicurezza **EasySAFE[®] PLUS** sono realizzati con struttura in polisulfone e sono completamente sterilizzabili in autoclave (134 °C - 18 min.).



Sono dotati di una valvola a galleggiante di troppo pieno e di un alloggiamento progettato per l'inserimento di un filtro antibatterico, per garantire la protezione completa del sistema di aspirazione da qualsiasi contaminazione.

Prodotti correlati



Regolatori di vuoto
da p. 69



Aspiratori Venturi
da p. 79



Contenitori di raccolta
p. 96

DIMENSIONI (AxLxP) 74x76x93 mm

PESO 0,12 Kg

SISTEMA DI TROPPO PIENO a galleggiante

CONNESSIONE AL PAZIENTE portagomma Ø 8,0÷9,0 mm

VALORE MASSIMO DI VUOTO APPLICABILE -950 mbar / 5 min.

VOLUME INTERNO 50 ml

- 1 Ghiera a scatto con aggancio rapido per regolatore di vuoto **EasyVAC® PLUS** e aspiratore Venturi **EasyAIR®**. Inseriti Soft Grip per una manipolazione facilitata.
- 2 Accoppiamento bicchiere - **coperchio con aggancio rapido 1/12 di giro** per facilitare la pulizia e la sostituzione del filtro.
- 3 Connessione al paziente, portagomma Ø 8,0÷9,2 mm con possibilità di **orientamento a 360°**.
- 4 **Alloggiamento** per il montaggio di un filtro antibatterico Ø 50 mm (opzionale).
- 5 **EasyVAC® PLUS** e **EasyAIR®** assemblati a **EasySAFE® PLUS** (opzionale).

Regolatore di vuoto **EasyVAC® PLUS**, p. 72
Aspiratore Venturi **EasyAIR®**, p. 80



▶ GUARDA IL VIDEO



1



2



3



4